

Guia de Introdução Rápida EverGo



Etapa 2

1. Fixe a alça de mão e a alça tiracolo na maleta de transporte.

2. Coloque as baterias.

Para colocar as duas baterias de íon de lítio, abra o zíper superior da unidade, levante a parte superior da maleta e abra a tampa.

Puxe o retentor cinza para trás na parte de cima do EverGo e coloque cuidadosamente uma bateria com a etiqueta da Respironics virada para o lado de dentro do aparelho. O retentor se encaixará sobre a bateria. Coloque a segunda bateria usando o mesmo processo. Feche o zíper da maleta.

Importante: Se uma das baterias se projetar acima da superfície cinza, é provável que ela esteja ao contrário. Retire-a e coloque-a corretamente.



Etapa 3

3. Coloque o EverGo em lugar bem ventilado com o filtro de partículas encaixado no pequeno compartimento de rede com zíper.

4. Carregue as baterias usando o cabo de alimentação de CA.

Primeiro, ligue firmemente o cabo de alimentação à fonte de alimentação. Em seguida, conecte o cabo de saída da fonte de alimentação de CA na tomada de entrada na lateral do EverGo. Ligue o cabo de alimentação de CA em uma tomada elétrica.

Importante: Antes de usar o aparelho pela primeira vez é necessário carregar completamente as baterias EverGo (mínimo de 4 horas) usando o cabo de alimentação de CA. Só ligue o aparelho para funcionar com bateria quando elas estiverem totalmente carregadas.



Etapa 4

5. Conecte a cânula nasal na saída de oxigênio, localizada na parte de cima do aparelho.

6. Ligue o aparelho EverGo.

Toque levemente em qualquer lugar da tela. Em seguida, toque no símbolo de ligar/desligar em até 5 segundos, caso contrário, a tela se desligará.



Etapa 5



Etapa 7

7. Regule o fluxo.

Toque no número grande no centro da tela (o ajuste 2 é mostrado aqui). Use as setas para cima e para baixo para regular o fluxo de acordo com a vazão prescrita pelo seu médico.

8. Posicione a cânula nasal em seu rosto e respire normalmente pelo nariz.

Duração da bateria EverGo

A tabela a seguir mostra a duração aproximada com uso de 20 respirações por minuto (RPM). Os períodos de tempo variam de acordo com o nível de atividade e o estado das baterias.

Regulagem do fluxo	Frequência respiratória de 20 RPM (2 baterias)	Frequência respiratória de 20 RPM (1 bateria)
1	12 horas	6 horas
2	8 horas	4 horas
3	6 horas	3 horas
4	4 horas	2 horas
5	4 horas	2 horas
6	4 horas	2 horas

Operação do carrinho de transporte EverGo



Para montar e usar o carrinho de transporte, siga estas instruções:

1. Coloque o carrinho de transporte em uma superfície plana, segure a alça com uma mão e abra o apoio da base.
2. Puxe para trás a tira elástica na traseira da maleta de transporte e deslize-a na alça do carrinho. Em seguida, deslize a bolsa de acessórios na alça do carrinho.
3. Pressione o botão “PUSH” localizado na parte de cima da alça. Em seguida, puxe a alça para cima, para levantar os braços do carrinho até a altura desejada.
4. O carrinho agora está pronto para transportar o concentrador de oxigênio e a bolsa de acessórios.

RESPIRONICS®

Respironics, Inc.: +1-724-387-4000
Respironics da Europa, África e Oriente Médio: +33-1-47-52-30-00
Respironics da Alemanha: +49-8152-93-06-0
Respironics da França: +33-2-51-89-36-00
Respironics da Itália: +39-03-62-63-43-1
Respironics do Reino Unido: +44-800-1300-845
Respironics da Suíça: +41-62-745-1750
Respironics da região Ásia-Pacífico: +852-3194-2280
Respironics da Austrália: +61-2-9666-4444
www.respironics.com

ATENÇÃO: A lei federal dos Estados Unidos limita a venda destes dispositivos por um médico ou por meio de receita médica.

Respironics é marca comercial registrada, e EverGo e Freedom Series são marcas comerciais da Respironics, Inc. e de suas afiliadas. Coberto por uma ou mais patentes. Outras patentes requeridas.

©2007 Respironics, Inc. e suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Broudy CY 12/28/07 MCI 4101493 PN 1050145